

1. Apertura CD/DVD

Inserire il CD/DVD nel proprio lettore/masterizzatore CD/DVD. La lettura/apertura del CD/DVD partirà automaticamente se sul proprio lettore/masterizzatore è impostato l'autoplay.




Nel caso in cui la lettura/apertura del CD/DVD non partisse automaticamente aprire le "risorse del computer" e lanciare il file "index.exe", contenuto nella cartella "viewers" del CD/DVD.

2. Lettura del contenuto CD/DVD

Il CD/DVD paziente contiene sia il referto sia le immagini prodotte.

Alla lettura/apertura del CD/DVD, i dati paziente/prestazione ed il referto sono presentati automaticamente nella prima pagina.

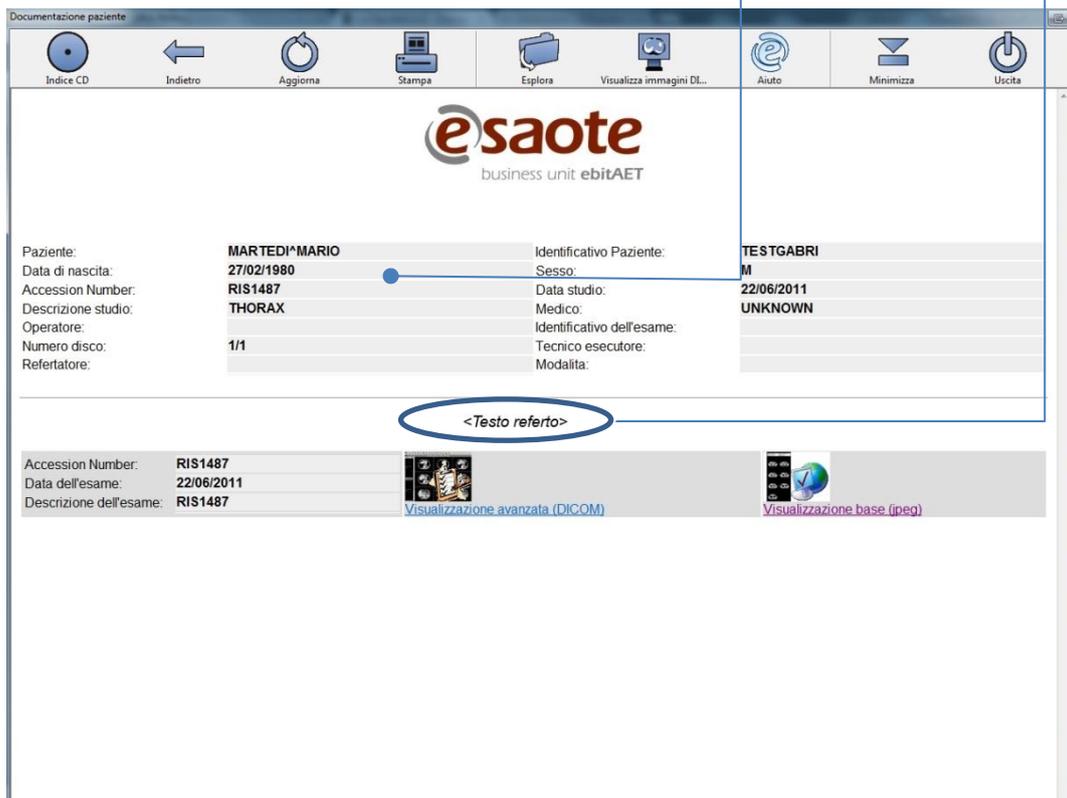

La barra comandi superiore permette di:



Aprire cd paziente

Aggiornare la pagina

Aprire il visualizzatore immagini

Aprire il presente quick start reference

In fondo quindi, al testo referto, sono riportati due pulsanti che permettono l'accesso alle immagini in due modalità distinte e differenti.



Il primo pulsante permette una visualizzazione statica delle immagini, senza possibilità di gestione e/o post-elaborazione, ma rapida e utilizzabile anche su pc dotati di basse risorse di sistema.



Il secondo pulsante, apre un potente, anche se intuitivo e leggero, visualizzatore di immagini che permette una gestione e/o post-elaborazione avanzata delle immagini.